

# Dispensez vo(s) stupéfiant(s) unitairement dans un bac de retrait sécurisé, via les nouvelles K7 CSD.

## Gestion des stupéfiants au bloc

Le module CSD a été spécialement conçu pour être utilisé dans les armoires Omnicell XT. Il s'agit d'un système de dispensation unitaire des stupéfiants au bloc, via K7 préremplies à la PUI, entièrement automatique, pour les grandes quantités de doses unitaires (hub de salles d'opérations).

- Offre plus de temps au personnel soignant grâce à un processus de travail plus efficace et à l'élimination des recomptages manuels.
- Économise du temps au personnel de la pharmacie et au personnel soignant lors de la clarification d'éventuelles divergences.
- Augmente la traçabilité et la sécurité lors du stockage et de la distribution de stupéfiants.
- Épargne une traçabilité manuelle chronophage grâce à un suivi électronique de chaque dose en temps réel.

### Mode opératoire de retrait des stupéfiants

↓ Identification de l'IDE à l'armoire

↓ Sélection du Patient ou Numéro d'intervention

↓ Sélection du/des stupéfiant(s) souhaités

↓ Marquage des articles à prélever

↓ Collecte du/des stupéfiant(s) dans le bac de retrait sécurisé dédié

Identification du bac de retrait ( tiroir dédié) par diodes lumineuses (LED) pour une sécurisation totale.



### Utilisez le temps pour les soins, pas pour le comptage

Les stupéfiants sont stockés en toute sécurité dans le module CSD sous forme de doses individuelles. Ainsi, le personnel soignant n'a accès qu'aux stupéfiants dont il a besoin et dans les quantités demandées. Le système se charge en outre de la documentation automatique en respectant les directives des autorités. Grâce aux protocoles complets, il n'est plus nécessaire de recompter manuellement les stupéfiants, et l'élucidation d'éventuelles divergences est considérablement facilitée. Le personnel de la pharmacie et les IDE disposent ainsi d'un temps précieux pour se consacrer aux soins des patients et à des activités à plus forte valeur ajoutée.

### Améliore la gestion des stupéfiants

- ◊ Des indicateurs visuels sur les cassettes facilitent le réapprovisionnement et les comptages de cycles.
- ◊ Grande capacité : peut contenir plus de 1.500 doses individuelles.
- ◊ Conception sûre des cassettes et capteurs intelligents minimisant le risque de retraits non autorisés.

### Configuration flexible

- ◊ Convient à toutes les tailles d'armoires Omnicell XT
- ◊ Possibilité d'intégration sur site dans les systèmes d'armoires de médication Omnicell XT existants pour répondre à des besoins changeants.
- ◊ Adapté à de nombreux types d'emballage, tels que les flacons, les seringues, les ampoules et les flacons d'injection



**Flacons :** Cassette pour comprimé en forme orale sèche en dose unitaire

**Flacons pour injection :** Cassettes pour 1-2 ml et 3-5 ml

**Ampoules :** Cassettes pour 1-2 ml et 3-5 ml

**Seringues :** Cassettes pour 2 ml

